

## Οδηγίες Χρήσης & Καθαρισμού

### ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:


Καθαρίστε τη συσκευή πριν και μετά από κάθε χρήση με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι. Ξεβγάλτε με ζεστό ή χλιαρό νερό. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, χημικά ή οποιαδήποτε άλλα υγρά καθαρισμού.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Χρησιμοποιείτε οικιακή απορροφητική μηχανή (ηλεκτρική σκούπα) με ισχύ 700-1500watt.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή Arianna R Baby Vac™ MONO για αυτόν τον σκοπό, για κανέναν άλλον.
- Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν κάποιο από τα εξαρτήματά της λείπει ή χαλάσει.
- Προφυλάξτε τη συσκευή αυτή από υψηλή θερμοκρασία και υγρασία.
- Καθαρίστε το μπροστινό άκρο τής συσκευής με κάποιο απαλό πανί ή βαμβάκι βρεγμένο με οινόπνευμα.
- Μη χρησιμοποιείτε άλλα χημικά.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από ηλιακές ακτίνες.

### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

- Τοποθετήστε το μπροστινό άκρο τής συσκευής (3) στον συλλέκτη (2).
- Ενεργοποιήστε την οικιακή απορροφητική μηχανή (ηλεκτρική σκούπα).
- Εφαρμόστε το ADAPTER (1) στον σωλήνα τής οικιακής απορροφητικής μηχανής.

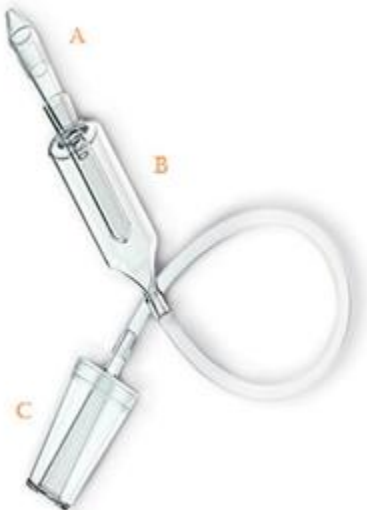

- A. Το σημείο που ενώνεται με τον σωλήνα της ηλεκτρικής σκούπας.
- B. Το σημείο όπου μαζεύονται τα φλέματα.
- C. Το σημείο που εφαρμόζεται στο ρουθούνι.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

- Κρατείστε το βρέφος-παιδί σας καθισμένο στα γόνατά σας μέχρι να αισθανθεί άνετα με τη συσκευή.

- Εφαρμόστε το μπροστινό άκρο τής συσκευής (3) στον ρινικό αεραγωγό (ρουθούνι) του βρέφους-παιδιού για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι που οι βλέννες συγκεντρωθούν στον συλλέκτη.
- Επαναλάβετε στον άλλο ρινικό αεραγωγό (ρουθούνι).
- Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κλείστε την οικιακή απορροφητική μηχανή και καθαρίστε τη συσκευή Baby Vac.

Επαναλάβετε.



ετοιμάστε  
ζεστό νερό  
και σαπούνι



καθαρίστε  
το σύστημα  
Baby Vac



τοποθετήστε  
σε σταθερή θέση  
το βρέφος



εφαρμόστε  
το Baby Vac  
στην οικιακή συσκευή  
ισχύος ~700-1500 watts



τοποθετήστε  
απαλά στα  
ρουθούνια του



ξεπλύνετε  
το Baby Vac  
με ζεστό νερό